

Contour[®] plus ONE[»]

Kan Şekeri Takip Sistemi

CONTOUR® DIABETES

uygulamasıyla

Şablonlarım'ı kullanma



Tedavi, diyet veya egzersizinizde değişiklik yapmadan önce daima
Sağlık Profesyonelinize danışın.



Contour®
plus ONE»
Kan Şekerini Takip Sistemi

Şablonlarım özelliđi, kan řekeri ölçümlerinizde belirli řablonları ve trendleri tanımlar ve sizi bunların ardında yatan olası sebepler hakkında bilgilendirir.



Contour[®]
plus ONE[»]
Kan řekeri Takip Sistemi

Şablonlarım özelliđi, kan řekeri ölçümlerinizde belirli řablonları ve trendleri tanımlar ve sizi bunların ardında yatan olası sebepler hakkında bilgilendirir.



Contour
plus ONE
Kan Şekeri Takip Sistemi

1. Şablonlarım

Ana Menü'den **Şablonlarım** seçeneğini belirleyin



Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekeri Takip Sistemi

2. Şablonlarım

Şablonlarım ekranında bildirim almak istediğiniz şablonlar gösterilir. Okunmamış şablon mor bir daireyle işaretlenir.



Contour
plus ONE
Kan Şekeri Takip Sistemi

2. Şablonlarım


Şablon seçiminizi değiştirmek veya geçmiş şablonlarınızı incelemek için **Daha Fazla** seçeneğine dokununuz.



Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekerini Takip Sistemi

3. Şablonlarım


Hangi şablonlar hakkında bildirim verileceğini seçmek için **Şablon Seçimi** seçeneğine dokununuz.

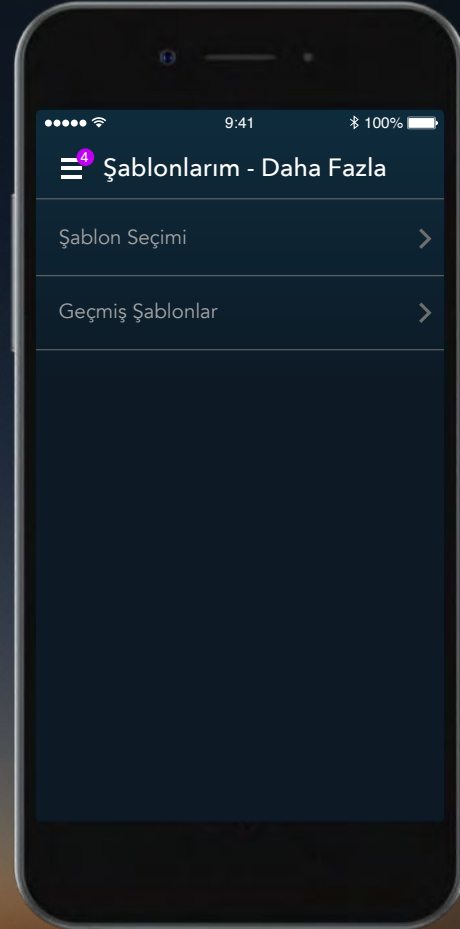

Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekerini Takip Sistemi

3. Şablonlarım


Hangi şablonlar hakkında bildirim verileceğini seçmek için **Şablon Seçimi** seçeneğine dokununuz.

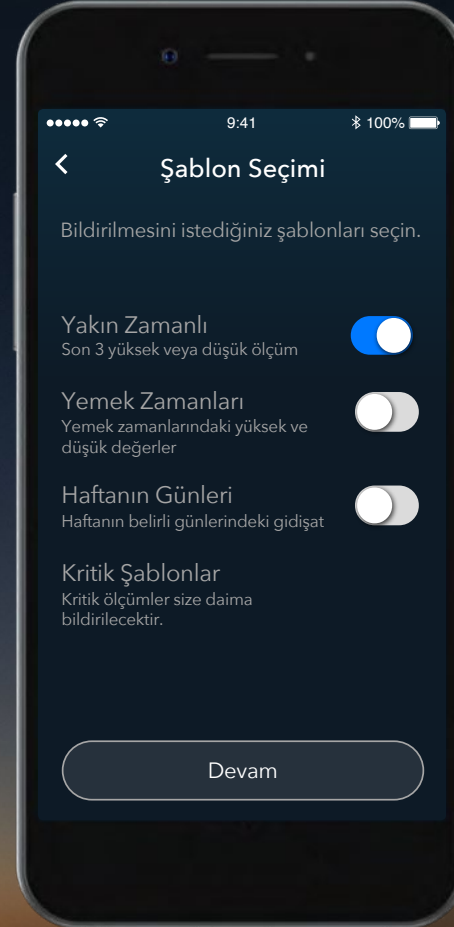

Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekerini Takip Sistemi

3. Şablonlarım

Hangi şablonlar hakkında bildirim verileceğini seçmek için **Şablon Seçimi** seçeneğine dokununuz.

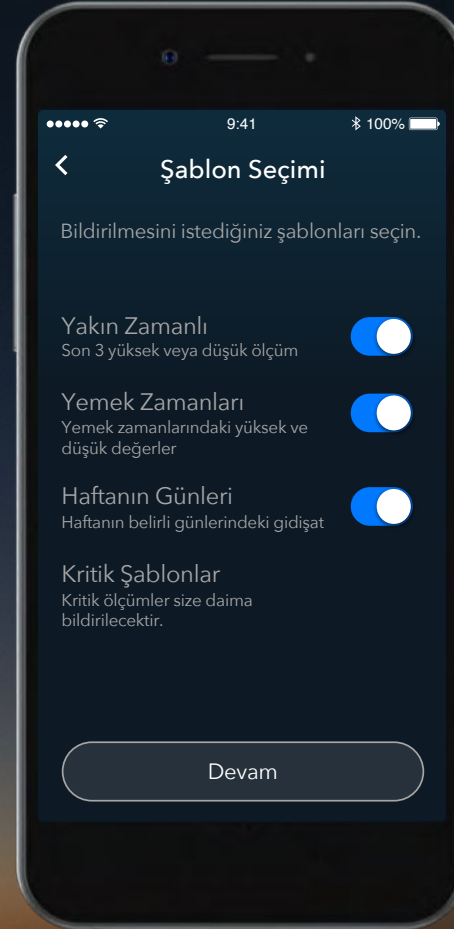

Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekerini Takip Sistemi

4. Şablonlarım

Saptanan tüm şablonlar **Şablonlarım** ekranında listelenir.

Şablonlarım ekranında bildirim almak istediğiniz şablonlar gösterilir. Okunmamış şablon mor bir daireyle işaretlenir.



Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekeri Takip Sistemi

4. Şablonlarım


Şablon ayrıntılarını görebilir ve olası nedenler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.



Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekeri Takip Sistemi

4. Şablonlarım


Bu şablona neyin neden olabileceği hakkında daha fazla bilgi alabilir ve yiyecek, ilaç veya aktivite gibi olası nedenler arasından seçim yapabilirsiniz.

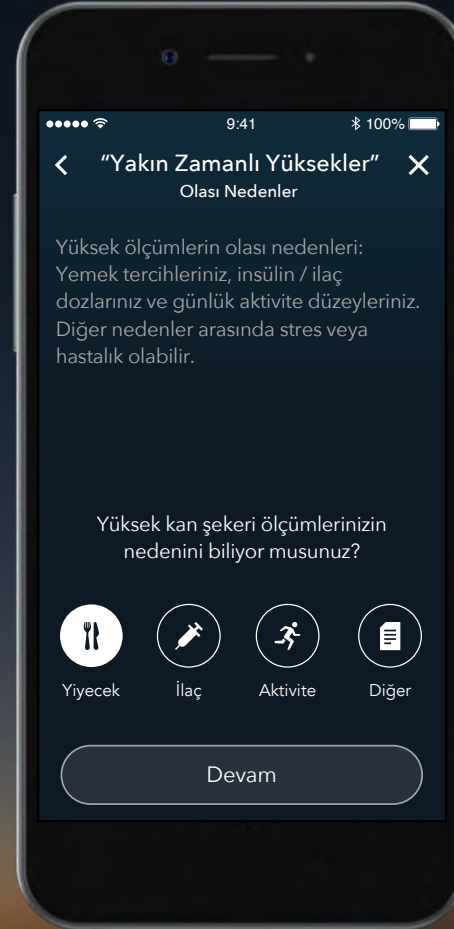

Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekeri Takip Sistemi

4. Şablonlarım


Ayrıca olası bir nedenle ilgili bir hatırlatma ayarlayabilirsiniz.

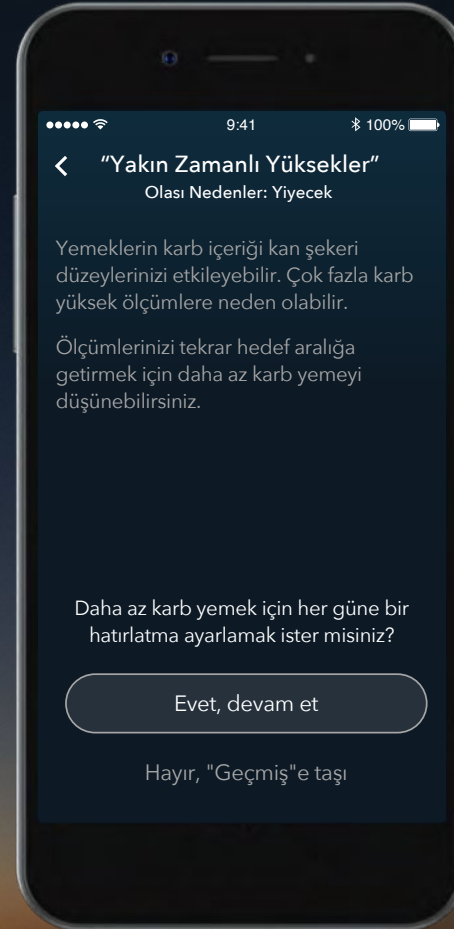

Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekeri Takip Sistemi

5. Şablonlarım


İstediğiniz zaman **Geçmiş Şablonlar**'daki bir şablona geri gidebilirsiniz.

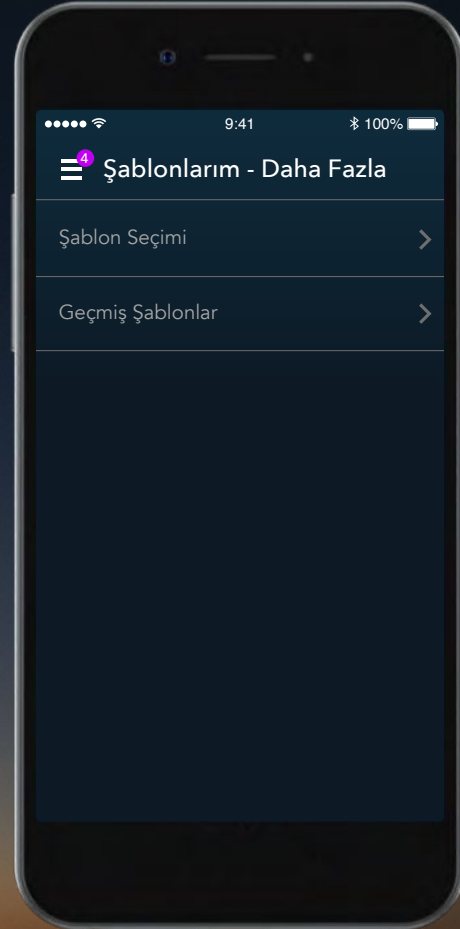

Contour[®]
plus **ONE**»
Kan Şekeri Takip Sistemi

5. Şablonlarım

Geçmiş Şablonlar'da, geçmişte saptanan ve artık aktif olmayan şablonları inceleyebilirsiniz.

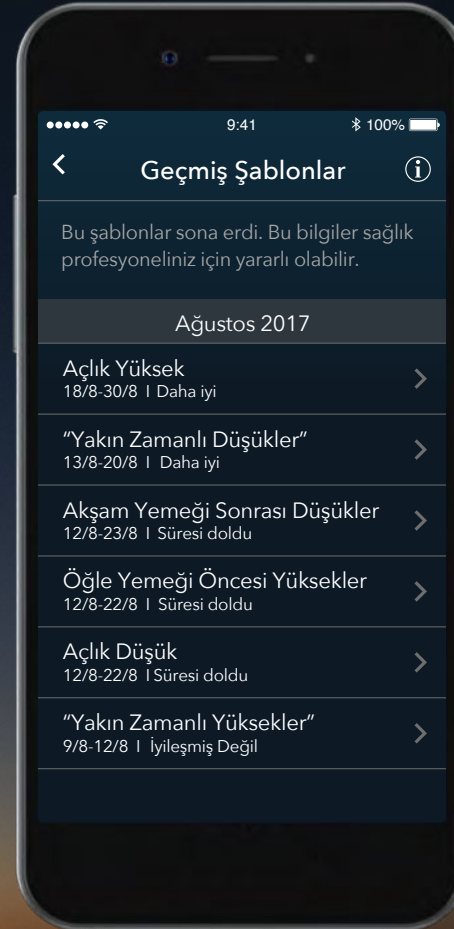

Contour[®]
plus ONE[»]
Kan Şekerini Takip Sistemi

5. Şablonlarım

Geçmiş Şablonlar'da, geçmişte saptanan ve artık aktif olmayan şablonları inceleyebilirsiniz.



Contour
plus ONE
Kan Şekerı Takıp Sistemi

CONTOUR®PLUS ONE akıllı ölçüm cihazı veya **CONTOUR®DIABETES** uygulaması hakkında sorunuz varsa Sağlık Profesyonelinizle görüşün ve ürün kullanma kılavuzuna bakın.

Daha fazla bilgi almak ve bu ürünlerin ülkenizde bulunup bulunmadığını öğrenmek için diabetes.ascensia.com adresini ziyaret edin.



Yalnızca gösterme amaçlı varsayımsal hasta verileri.
Tedavi, diyet veya egzersizinizde değişiklik yapmadan önce daima Sağlık Profesyonelinize danışın.



Apple ve Apple logosu, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'nin bir hizmet markasıdır. Bluetooth sözcük işareti ile logoları, Bluetooth SIG, Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır ve bu markalar, burada lisans kapsamında kullanılmıştır. Google Play ve Google Play logosu, Google Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır. Ascensia, Ascensia Diabetes Care logosu ve Contour, Ascensia Diabetes Care Holdings AG şirketinin ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Hazırlanma tarihi: Şubat 2018 Kod: G.DC.10.2017.52578



Contour®
plus ONE
Kan Şekeri Takip Sistemi

Contour[®]
diabetes solutions